

Installation Manual: Dr. Nano Mini for Dental

For G1/2

In case that waterline is connected with G1/2 pipe(1/2 inch diameter), please use optional parts for G1/2 and follow the below.
 本製品を設置する場所の規格が G1/2 の仕様となっている際は、以下のマニュアルに沿って同梱するオプションパーツをご使用ください。

MADE IN JAPAN



<p>1 Dr. Nano Mini (本体) x 1</p> <p>*Waterflow Mark (Waterflow マーク)</p> <p>*Important Dr. Nano has a water inlet and outlet. Please follow Waterflow Mark.</p> <p>※ご注意 設置におきましては、本体記載の「Waterflow マーク」を確認の上、上流と下流の向きをお間違えにならないよう十分ご注意ください。</p>	<p style="text-align: center;">Optional Parts for G1/2</p> <p>2 Socket (ソケット) x 1</p> <p>3 Gasket with filter (フィルター付きパッキン) x 1 (replacement-free)</p> <p>*These parts are for G1/2 only. For other diameters, please see our website.</p> <p>※ 記載のオプションパーツは G1/2 規格の仕様となっております。その他の規格につきましては、ブランドサイトをご確認ください。</p>
--	---

1 Choose a location to install the Dr. Nano, either on the faucet side or the unit side. A larger space is preferable. Remove the existing flexible pipe and set it back 2 inches (40mm).

Dr. Nano はジャンクションボックスの『蛇口の先 (A)』または『給水口の手前 (B)』のいずれかに設置します。既設のフレキシ管を外した場合に、後方に 40mm 以上セットバックできる広いスペースがある方をお選びください。

<p>A-2</p> <p>Waterflow 水の流れの向き →</p> <p>Faucet 蛇口側への設置</p> <p>→ A-2,3</p>	<p>B-2</p> <p>Waterflow 水の流れの向き →</p> <p>Unit Water Inlet 給水口側への設置</p> <p>→ B-2,3</p>
<p>Faucet 蛇口側への設置</p> <p>(* If necessary)</p> <p>*Gasket (パッキン)</p>	<p>Unit Water Inlet 給水口側への設置</p> <p>(* If necessary)</p> <p>*Gasket (パッキン)</p>
<p>A-3</p> <p>Faucet 蛇口側への設置</p>	<p>B-3</p> <p>Unit Water Inlet 給水口側への設置</p>